



# QuickTip® пакет для спермы хряка



## Безопасные пакеты для спермы хряков

### Максимальная безопасность

Пакеты Minitube для спермы хряков изготовлены из инновационной многослойной полиэтиленовой пленки и на **100% спермадобротные** (в соответствии со стандартом Sperm Safe).

Это первая полиэтиленовая пленка, используемая в производстве пакетов для спермы, полностью свободных от клея. Клей часто используется в многослойных пластиковых пленках для объединения несовместимых слоев. Однако клей является потенциально токсичным для спермиев, и известны случаи выбраковки спермадоз, расфасованных в пакеты. Проникновение клея внутрь поврежденных пакетов приводит к серьезным проблемам с фертильностью. Пакеты Minitube изготовлены из инновационной пленки, в которой клей был заменен на полностью спермадобротный слой.

### Отсутствие клея в пакетах Minitube - уверенность в безопасности для спермы!

- Каждая партия пакетов Minitube проходит анализ на **спермадобротность Sperm Safe**
- Материалы и сырье поставляются исключительно сертифицированными немецкими поставщиками и соответствуют директивам FDA и ЕС
- Все партии сырья проходят тест на спермадобротность перед выпуском в производство
- Производственный процесс гарантирует полную отслеживаемость
- Изготовлены компанией Minitube на сертифицированных по стандарту ISO 9001:2015 производственных площадках и проходят регулярный аудит независимыми организациями



ninitube ninitube



**100%**  
спермадобротность

Стандартный пакет для спермы

Пакет для спермы QuickTip®

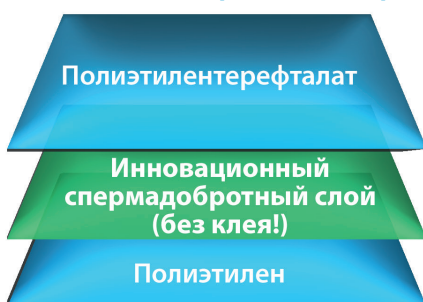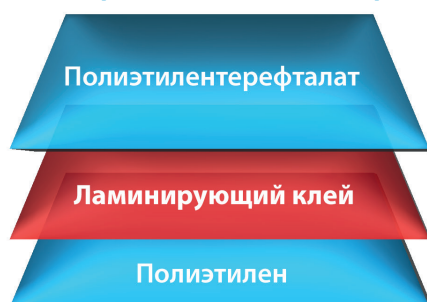

Структура многослойной полиэтиленовой пленки




## Удобные в использовании

Проверенная временем система **QuickTip®** гарантирует простое и быстрое использование осеменаторами.

- Наконечники остаются надежно закрытым до начала искусственного осеменения
- Легко открыть, согнув наконечник без каких-либо инструментов, легко подсоединяется к любому катетеру
- После вскрытия пакета наконечник остается на конце пакета и не попадает в навоз
- Подходит для всех типов катетеров и техник осеменений
- Быстрое, простое и гигиеничное осеменение

Пакеты для спермы Minitube предлагаются различных размеров и форматов. Они совместимы со всеми распространенными машинами для фасовки и запайки пакетов.

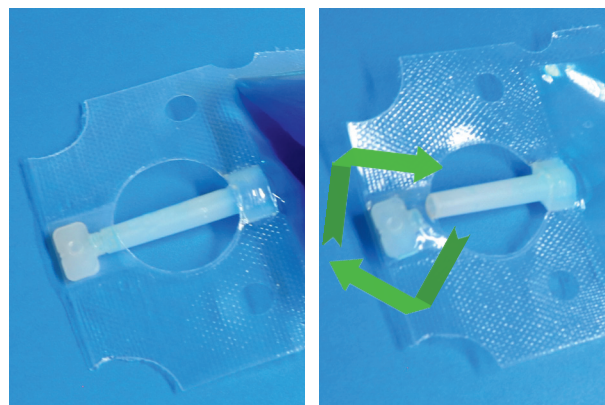

Система QuickTip®: просто, быстро и надежно

## Информация для заказа

Пакет для спермы QuickTip®, узкий тип	
объем до 60 мл, 1000 шт./рулон [1]	13460/0060
объем до 90 мл, 1000 шт./рулон [2]	13460/0090
объем до 90 мл, с перфорацией, 750 шт./рулон	13460/0190

Пакет для спермы QuickTip®, широкий тип	
объем до 60 мл, 1000 шт./рулон [3]	13460/1060
объем до 90 мл, 1000 шт./рулон [4]	13460/1090
объем до 90 мл, с перфорацией, 750 шт./рулон	13460/1190



1 узкий тип  
60 мл



2 узкий тип  
90 мл



3 широкий тип  
60 мл



4 широкий тип  
90 мл

