



CowScore



Вспомогательная репродукция в новом ракурсе


Многофункциональный видеоэндоскоп CowScore предназначен для скотоводов, ветеринаров и техников по искусственному осеменению. Инструмент используется для управления процессом воспроизводства, осеменения крупного рогатого скота и проведения тренингов.

Благодаря визуализации влагалища и канала шейки матки можно легко ввести QuickLock Ergo в шейку матки **без ректальной пальпации**. Инструмент **очень прост в настройке, использовании и очистке**.

Источник света и фиксируемый спекулум обеспечивают **четкий обзор**. Гигиеническая трубка вводится в рабочий канал и заменяется после каждого осеменения. Кроме того, для защиты прибора при введении его во влагалище используется гигиенический чехол. После использования CowScore можно промыть и протереть с помощью гигиенических салфеток.

Для отображения видео **в режиме реального времени** необходим смартфон (предлагается отдельно).

- Простота и легкость в настройке, использовании и очистке
- Узкий корпус для эргономичного обращения и комфорта животного
- Эффективное осеменение под визуальным контролем с проведением ректальной пальпации или без нее

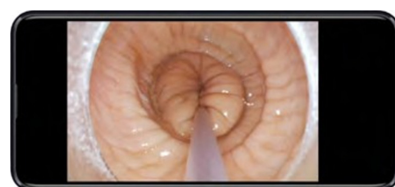

Искусственное осеменение

Визуальный контроль позволяет сделать искусственное осеменение более простым и безопасным. Благодаря эргономичному дизайну CowScore работа с инструментом для искусственного осеменения аналогична искусственному осеменению без эндоскопа. Устройство настолько тонкое, что возможно проведение ректальной проверки правильности положения инструмента QuickLock Ergo для дальнейшего осеменения. Гигиенический чехол сохраняет инструмент и руки техника в чистоте.

- Визуальный контроль облегчает введение инструмента ИО через шейку матки
- Узкая форма позволяет использовать инструмент для телок
- Способствует выявлению скрытой половой охоты при осмотре влагалища на наличие слизи

Управление воспроизводством

Выявление проблем и своевременное лечение улучшают репродуктивное здоровье и фертильность стада. Вагинальный осмотр может выявить заболевания, которые иначе остались бы незамеченными. Могут быть диагностированы воспаление или выделения, вызванные метритом, вагинитом или эндометритом, а также кровотечения, урвагина или врожденные аномалии. Наличие пробки из цервикальной слизи указывает на стельность.

- Возможность записи и передачи изображений/видео ветеринару
- Раннее выявление и лечение проблем репродуктивного здоровья
- Использование CowScore для лечения



Обучение

Использование CowScore позволяет визуализировать процесс искусственного осеменения при обучении техников-осеменаторов и студентов-ветеринаров. С помощью данного инструмента довольно просто разобраться в анатомии и освоить технику искусственного осеменения. Запись с камеры можно передавать по беспроводной связи на внешний монитор или телевизор (для этого требуется Google Chromecast или аналогичное устройство, не входит в комплект поставки).

- Простота изучения анатомии благодаря визуальной информации
- Вывод изображения с камеры на внешний монитор или экран телевизора
- Более быстрое освоение техники искусственного осеменения с меньшим стрессом для животных



Информация для заказа

Видеоэндоскоп CowScore в футляре для переноски, с гигиеническими трубками (20х), наконечниками спекулума (2х), фиксатором инструмента для ИО (QuickLock Ergo). Оснащен камерой Full HD (1080p) и светодиодным (LED) источником света.

CowScore

APT.: [17065/0000](#)



Опционально

Приложение для использования CowScore доступно бесплатно в интернет-магазине Google Play. Требования к смартфону: Android 11 (или выше) и разъем USB C. Смартфон на базе Android предлагается опционально отдельно.

Смартфон Wiko Power U30 U30 с зарядным устройством, экран 6,8" с разрешением HD+, 128 GB, Android 11, USB C

APT.: [17065/0002](#)

Чехол для смартфона

APT.: [17065/0003](#)

Нашейный держатель для смартфона

APT.: [17065/0004](#)

Принадлежности

Наконечник спекулума

APT.: [17065/0007](#)

Гигиеническая трубка, 20 шт./упаковка

APT.: [17065/0005](#)

Гигиенический чехол, 100 шт./упаковка

APT.: [17065/0006](#)

Фиксатор инструмента для ИО (QuickLock Ergo)

APT.: [17065/0008](#)

Салфетки для очистки CowScore, 70 шт./упаковка

APT.: [17065/0009](#)



minitube