



Suzy, KB-Trainingsmodell



Innovativer Ansatz für das KB-Training beim Schwein

Suzy ist eine Modellsau zum Training von Besamungstechnikern in einer sicheren und bequemen Umgebung, bevor sie beginnen mit echten Tieren zu arbeiten.

Suzy besteht aus einem Kunststoffkörper und einem Innenleben aus Silikon. Sie verfügt über einen **äußerst lebensnahen gynäkologischen Trakt (GT)**, der entnommen werden kann, um im ersten Schritt der Trainingseinheit die Anatomie und den KB-Prozess zu demonstrieren.

Suzys GT verfügt über eine lebensnahe Zervix, an der das Einführen des Besamungskatheters in den Gebärmutterhals geübt wird. Ein akustisches Signal bestätigt den Erfolg, wenn der eingeführte Katheter die korrekte Position im Gebärmutterhals erreicht („Oink“). Eine Kopie der Harnröhrenöffnung ermöglicht das Erlernen von Techniken, die das Einführen des Katheters in die Harnröhre vermeiden. Durch einen Abfluss am GT ist das Besamen mit einer „echten“ Samenportion möglich. Sowohl die **traditionelle** als auch die **postzervikale Besamung** können geübt werden. Der GT verfügt über einen durchsichtigen Schlauch, über den der Trainer den Vorschub der inneren Kanüle des PCAI-Katheters verfolgen kann.

Suzys Einsatz schafft Flexibilität hinsichtlich Zeitpunkt und Ort der KB-Ausbildungskurse und senkt das Risiko von Tierverletzungen durch unerfahrene Schüler deutlich. Trainingseinheiten können so oft wie nötig wiederholt werden. All diese Vorteile führen zu einem **optimalen Training** und letztendlich zu einer verbesserten Leistung der KB-Schüler.

Produktmerkmale

- Lebensechte Modellsau inkl. gynäkologischem Trakt und Zervix für ein authentisches Gefühl beim KB-Training
- Modularer Ansatz mit verschiedenen Trainingsstufen für schnellen Lernerfolg
- Sehr natürliche Passage der inneren Kanüle des PCAI-Katheters durch spürbare Gebärmutterhalskissen
- Korrekte Einführung von Katheter und Innenkanüle wird bestätigt durch „Oink“-Geräusch
- „Echter“, vollständiger Besamungsprozess kann trainiert werden
- Kompaktes und leichtes Trainingsmodell für einfachen Transport und Reinigung



Steigern Sie die Effizienz Ihres KB-Trainings und tragen Sie zur Verbesserung des Tierschutzes bei!



Bestellinformation

Suzy, KB-Trainingsmodell Schwein - mit vollständigem gynäkologischen Trakt für die traditionelle und postzervikale Besamung

REF.: 22400/0100


Ersatzteile

(1) Außenteil mit Rectum, Vulva und Schwanz

REF.: 22400/0105

(2) Gynäkologischer Trakt für die traditionelle und postzervikale Besamung mit Oinkmaster, Vaginalröhre und Zervix

REF.: 22400/0106

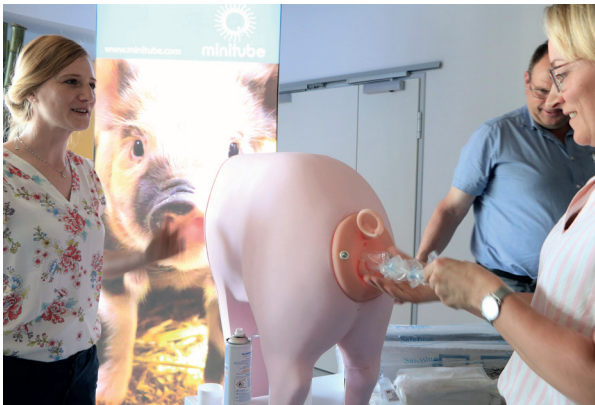

Starter-Kit enthält

100 Besamungskatheter (Ref. 17106/9176) und
2 Tuben ReproJelly (Ref. 11907/0100)

