



# Suzy, modelo de entrenamiento para IA porcina



## Nuevo enfoque de entrenamiento en inseminación artificial

Suzy es un modelo de cerda para entrenamiento de inseminación artificial (IA). La inseminación artificial puede ser practicada en un entorno seguro y adecuado, antes que los futuros técnicos deban trabajar con animales vivos.

Suzy está formada por un cuerpo de material plástico y órganos internos de silicona. Proporciona un **tracto genital (TG) muy realista** que puede extraerse para demostrar la anatomía y el proceso de IA como un paso inicial de la sesión de entrenamiento.

El TG de Suzy presenta un cérvix, similar al natural, de tal modo que puede practicarse la fijación del catéter de IA en el cérvix. Cuando el catéter introducido ha alcanzado la posición correcta en el cervix, Suzy emitirá un sonido ("Oink"). Además, se puede practicar como evitar introducir el catéter de IA en la uretra, puesto que el TG de Suzy tiene una abertura que simula la entrada en al vejiga urinaria. También es posible realizar una inseminación con una dosis de semen, puesto que el TG posee un drenaje. Tanto la **IA tradicional** como la **IA post-cervical** se pueden practicar. El tracto genital presenta un tubo transparente, donde el entrenador puede ver el avance de la cánula interna del catéter PCAI.

Suzy permite flexibilidad en relación a los horarios y localización de cursos de entrenamiento de IA, y reduce el riesgo de lesiones a los animales por aprendices inexpertos. Los entrenamientos pueden repetirse las veces que sea necesario. Todas estas ventajas ayudan a proporcionar un **buen aprendizaje** y, en definitiva, una mejora del rendimiento de los técnicos en IA de cerdas.

### Características del producto

- Modelo realista de cerda, de su tracto genital y del cérvix que proporciona una sensación auténtica durante el entrenamiento de IA
- Enfoque modular que proporciona diferentes niveles de entrenamiento
- El paso de la cánula interna del catéter PCAI es muy natural a través de almohadillas palpables en el cuello del útero
- Sonido de confirmación cuando el catéter de IA ha sido introducido correctamente
- Se puede realizar un proceso completo de inseminación (con una dosis de semen)
- Modelo de entrenamiento compacto y liviano para facilitar el transporte y la limpieza



**¡Aumente la eficiencia de sus cursos de entrenamiento de IA y contribuya a mejorar el bienestar animal!**



## Información para pedidos

Suzy, modelo de entrenamiento - con tracto genital completo para entrenamiento en IA tradicional y IAPC

REF: [22400/0100](#)


## Recambios

(1) Parte exterior con recto, vulva y cola

REF: [22400/0105](#)

(2) Tracto genital para inseminación tradicional y postcervical (IAPC), consiste en: Oinkmaster, tubo vaginal y cervix

REF: [22400/0106](#)

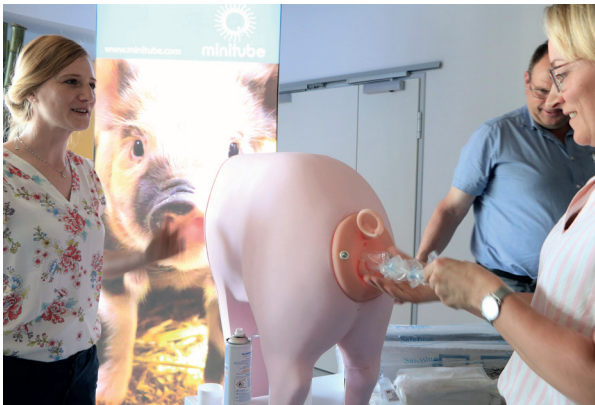

## Kit de inicio incluye

100 catéteres de IA (Ref. 17106/9176) and 2 tubos ReproJelly (Ref. 11907/0100)

